

# BARRIER® Höftlakan med Drisite® Plus



- Drisite® Plus för god vätskehantering där materialet utsätts för rikligt med vätska
- Förstärkt material i det kritiska området för bättre hållbarhet och infektionskontroll
- Integrerade slanghållare för att på ett effektivt sätt fästa slangar etc.
- Optimal vikning för aseptisk applicering
- 100% vätsketättmaterial som ger optimal patientsäkerhet
- Tredimensionell design för att på ett effektivt sätt säkerställa sterilt område



1. Vik ut lakanet och placera det under patientens ben.



2. Alt. 1: Placera en självhäftande op-handduk under benet med den självhäftande kanten pekandes mot huvudändan, ta bort skyddspapperet. Placera en andra självhäftande ophandduk över den första handduken med den självhäftande kanten pekandes mot fotändan.



3. Vik handdukarna runt ben och fot.



4. Försegla kanterna runt foten och längs med benet med op-tejp.



2. Alt. 2: Täck benet med en ortopedistrumpa och fixera med



5. Placera foten i hålet på lakanet. På undersidan av operationslakanet finns en självhäftande kant som kan användas för extra fixering.



6. För lakanet mot patientens huvud, fäst det elastiska hålet i rätt läge.



7. Vik ut operationslakanet över narkosbågen.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek	Avd/Trp
60600	Höftlakan, elastiskt hål 18 x 22cm, inslagen	230/300 x 330cm	6 / 12

Art. nr	Mölnlycke® kundanpassade set komponent	Storlek
70600	Höftlakan, elastiskt hål 18 x 22cm	230/300 x 330cm

Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00. Namnet Mölnlycke Health Care och logotypen och BARRIER® är registrerade globalt och tillhör något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna. SESU0421803