



Avtagning av skyddsrock och undersöknings- eller operationshandskar

Avtagning kontaminerad rock och handskar

- Behåll handskarna på, ta tag i rocken vid midjan.
- Dra bort rocken från kroppen så att knytbanden bryts.
- Vidrör bara utsidan av rocken med dina handskbäklädda händer, för rockens halsringning och ärmar framåt, rulla ihop den till ett knyte.
- Dra av handskarna samtidigt som rocken tas av, vidrör endast insidan av handskar och rock med bara händer.
- Släng rocken och handskarna och desinficera händerna.

Om handskarna inte följer med när du tar av dig rocken, släng rocken och använd dig av handsk mot handsk-, hud mot hudtekniken (bild F och G) för att ta av dig handskarna, desinficera dina händer.

- Ta av den första handsken med hjälp av handsk mot handskteknik.
- Ta av den sista handsken med hjälp av hud mot hudteknik. Desinficera dina händer.

Notera

När användaren inte kan bryta banden på rocken och det inte finns någon assistent tillgänglig för att knyta upp dem, bör handskarna tas av först med hjälp av handsk mot handsk-, hud mot hudtekniken. Handhygien bör utföras innan rocken tas av, vidrör endast insidan av rocken. Avsluta med att utföra handhygien igen.



Baserat på: AORN Riktlinjer för perioperativ praxis, 2019. Riktlinjer för överföringsbaserade försiktighetsåtgärder. sid 1098-1104. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderas sekvenser för påtagning och avtagning av personlig skyddsutrustning. <https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf>

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Telefon 031 722 30 00
Varumärkena, namn och logotyper Mölnlycke och Biogel registreras globalt till ett eller flera av Mölnlycke Health Care-koncernen.
© 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.