



Avtagningsguide

Avtagning kontaminerad skyddsrock och undersökningshandskar – rock först, handskar sist

- A. Ta tag i skyddsrocken vid midjan.
- B. Dra bort rocken från kroppen så att knytbanden bryts. Om flergångsrock- ta hjälp av en kollega att knyta upp banden.
- C. Vidrör bara utsidan av rocken med dina handskbeklädda händer, för rockens halslinning och ärmar framåt.
- D. Håll ärmar och rock borta från kroppen och rulla ihop den till ett knyte. Släng rocken.
- E. Ta av den första handsken genom att dra i manschettområdet med din handskbeklädda hand. Tryck ihop den i handen som har handske.
- F. Ta av den sista handsken, vidrör bara handskens insida.
- G. Släng dina handskar och desinficera dina händer.



Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Telefon 031 722 30 00
Varumärkena, namn och logotyper Mölnlycke och Biogel registreras globalt till ett eller flera av Mölnlycke Health Care-koncernen.
© 2020 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.