



## Användarguide: Operationsmunskydd med visir

*När det finns risk för vätskestänk, använd då ett 4-lagers stänksäkert operationsmunskydd med integrerat visir eller ett 4-lagers stänksäkert operationsmunskydd och skyddsglasögon eller visir.*

- A. Före det att du tar på dig operationsmunskyddet, vik kanterna på visiret för bästa skydd mot sidostänk.
- B. Forma näsklämman.
- C. Vik ut munskyddet.
- D. Placera operationsmunskyddet så att det täcker både din näsa och mun.
- E. Placera de övre knytbanden på övre bakkdelen av ditt huvud och dra åt för att minimera luftläckage.
- F. Placera de nedre knytbanden runt nacken och dra åt.
- G. Vik alltid ut munskyddet helt för att minimera antal lager som du behöver andas igenom.
- H. Byt munskydd när det har kontaminerats samt mellan operationer.
- I. Släng operationsmunskyddet efter användning.