



Hur man använder
BARRIER® filtrerande andningsskydd

Påtagning av Barrier® filtrerande andningsskydd



1. Separera övre och nedre kanter på andningsskyddet.



2. Kupa andningsskyddet under hakan och dra banden över huvudet.



3. Placera det övre bandet ovanför öronen och det undre bandet under öronen.



4. Justera näsklämman över näsan med båda händerna och se till att det sluter tätt mot huden. Justera andningsskyddet så det sitter bekvämt och har en säker passform. Utför tätningskontroll (se nedan) och justera andningsskyddet om det behövs.

Avtagning av Barrier® filtrerande andningsskydd



1. Ta tag i banden och dra dem över huvudet.



2. Släng andningsskyddet direkt efter användning, håll endast i banden. Desinficera dina händer.

Kontroll av munskyddets försegling

Tätningskontrollen bör genomföras varje gång ett nytt filtrerande andningsskydd tas på. Andas ut kraftigt när du bär andningsskyddet. Läcker det ut luft längs näsa, haka och kinder, justera näsklämman så att den passar ansiktsformen. Om luft kommer ut nära andningsskyddets kanter, försök att rätta till banden eller justera munskyddet för bättre passform. Om andningsskyddet inte passar ordentligt kan dess funktion inte garanteras.

Om luft läcker runt näsan

Använd båda händerna för att justera näspartiet genom att placera fingertopparna högst upp på metallnäsklämman. Skjut fingertopparna ner på båda sidor av metallremsan för att effektivt forma den efter din näsform.

Läs mer på www.molnlycke.se

Molnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Telefon 031 722 30 00
Varumärkena, namn och logotyper Molnlycke och BARRIER registreras globalt till ett eller flera av Molnlycke Health Care-koncernen. © 2020 Molnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.