



Gelbildande fiberförband

- Hög retentionskapacitet förebygger läckage och maceration¹
- Hög fiberstyrka gör att förbandet enkelt kan avlägsnas i ett stycke²
- Absorberar och hanterar sårvätska, blod och bakterier tack vare överlägsen retentionskapacitet¹
- Hög absorption, även under kompression
- Kan sitta kvar på plats i upp till 7 dagar och upp till 14 dagar på tagställen

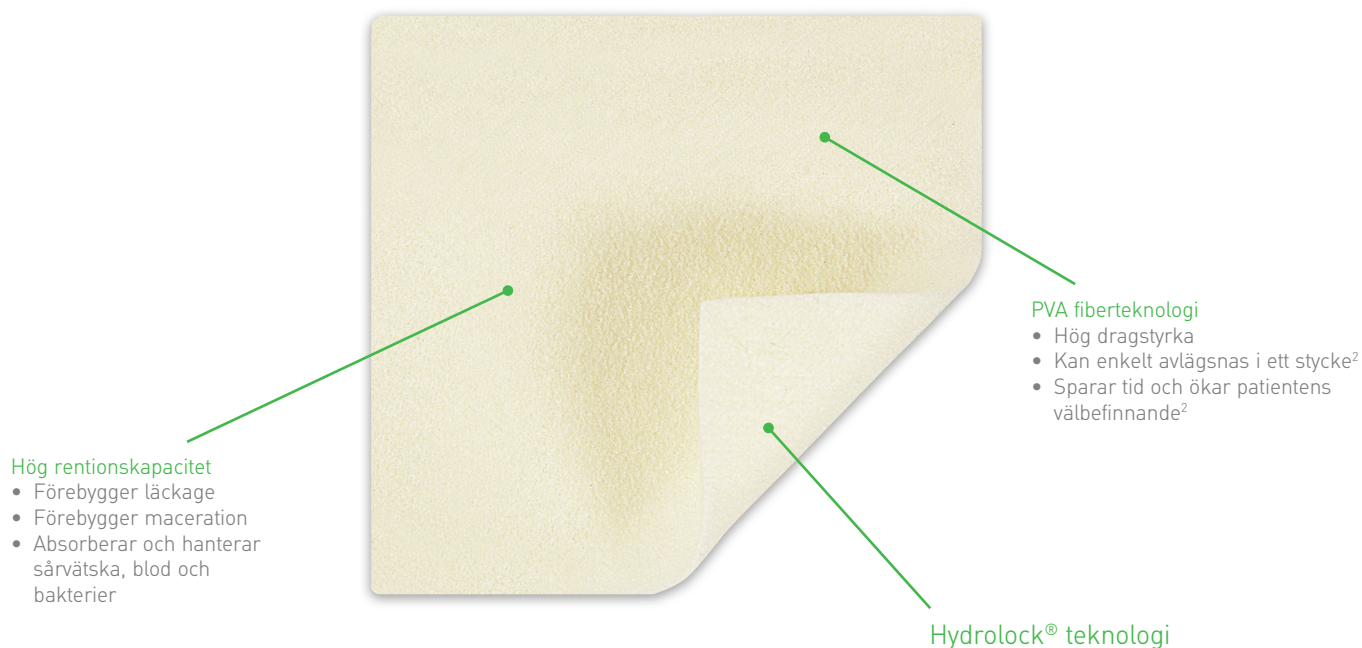


Hydrolock® teknologi

De starka polyvinylalkohol (PVA) fibrerna i Exufiber är sammansatta i alla riktningar och mekaniskt fästa i varandra, vilket ger en mycket hög dragstyrka och hållfasthet i vått tillstånd. PVA-fibrernas höga förmåga att binda vätska tillsammans med ett optimalt utrymme mellan fibrerna gör att vätskan hålls kvar i förbandet och ger en hög retentionskapacitet.¹

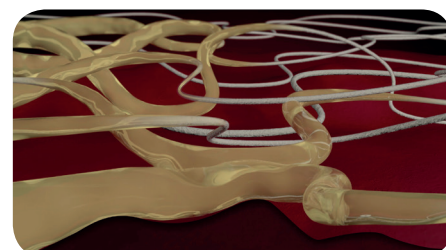


Så här används Exufiber

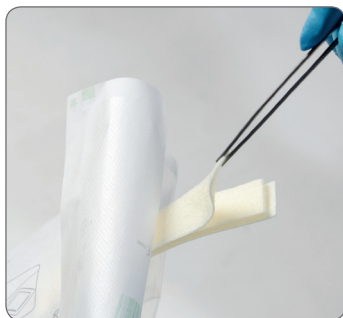

1. Rengör såret enligt gällande rutin och torka torrt



2a. Applicera en torr Exufiber på såret. Förbandet ska täcka såret och överlappa den omkringliggande huden med 1-2 cm vid mindre sår och 5 cm vid större sår. Förbandet kommer att krympa när det absorberar vätska och bildar en gel.

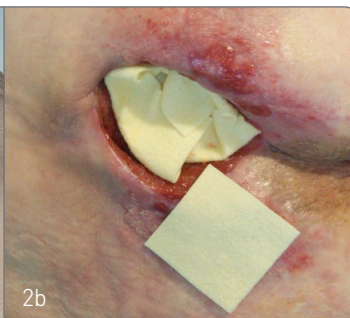

2b. Fyll sårhålan löst med kompressen eller tamponaden för att ge utrymme åt förbandet att expandera.



3. Fixera med lämpligt ytterförband. Exufiber kan användas i samband med kompressionsbehandling.

Så här fungerar Exufiber

Exufiber är ett sterilt nonwoven förband tillverkat av högabsorberande polyvinylalkoholfibrer. I kontakt med sårvätska omvandlas Exufiber till en gel som främjar fuktig sårhäkning och gör att förbandet enkelt kan avlägsnas.² Exufiber absorberar och hanterar sårvätska. Finns som både kompress och tamponad.

Användningsområden

Exufiber är avsedd att användas på ett flertal vätskande sår.

- Ben- och fotsår
- Trycksår
- Delhudsbrännskador
- Kirurgiska sår
- Tagställen
- Maligna sår
- Ytliga hudskador och andra sår orsakade av trauma

Observera

Alla sår skall inspekteras frekvent. Vid tecken på klinisk infektion skall vårdpersonal konsulteras för adekvat behandling. Exufiber är inte avsedd för torra sår eller fullhudsbrännskador.

Om förbandet fastnar och är svårt att avlägsna skall det återfuktas enligt lokal rutin (t. ex. med steril NaCl eller sterilt vatten) och låta det svälla tills det enkelt kan lyftas bort. Det kan ta några minuter innan Exufiber omvandlas till gel. Avlägsna förbandet genom att försiktigt tvätta/spola.

Exufiber sortiment (levereras sterila)

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
603300	5 × 5	10	40
603301	10 × 10	10	60
603302	15 × 15	10	60
603305	4,5 × 10	10	40
603306	4,5 × 20	10	50
603307	4,5 × 30	10	60
603303	20 × 30	5	20
603308	2 × 45	5	20

Notera: Alla storlekar finns inte tillgängliga i alla länder. V.g. kontakta din lokala representant från Mölnlycke Health Care för artiklar tillgängliga i ditt land.

Referenser: 1. Data-on-file report 20140806-001 Mölnlycke Health Care. 2. Chadwick P, McCordle J. Exudate Management Using a Gelling Fibre Dressing. The Diabetic Foot Journal 2015; 18(1)

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Telefon: 031-722 30 00
www.molnlycke.com

The Mölnlycke Health Care, Exufiber® names and respective logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2014 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.

