


Det effektiva förbandet för transport av sårsekret

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{1,2}
- Transporterar sårvätska bort från såret och minskar risken för maceration³
- Smidigt, följsamt och formbart vilket underlättar omläggning av svårbandagerade områden

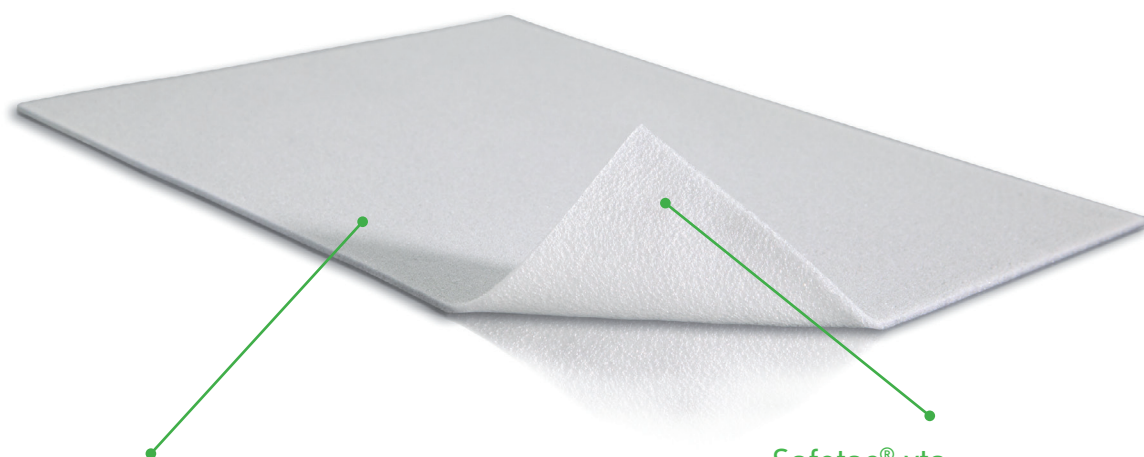

Tunt lager av polyretanskum

- Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband
- Formar sig väl och är lämplig för sår som är svåra att lägga om
- Lämpligt för stora och vätskande sår


Safetac® yta

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte¹
- Vidhåftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration


Safetac® teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

För mer information www.safetac.com

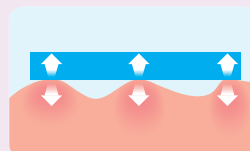


Traditionell vidhäftning fäster endast på hudens översta ytskikt och måste därför vidhäfta aggressivt för att sitta på plats

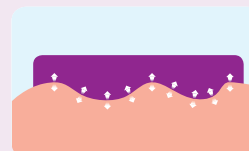


Safetac formar sig efter hudens ojämnheter och sluter sig kring sårkanterna


Så här används Mepilex® Transfer

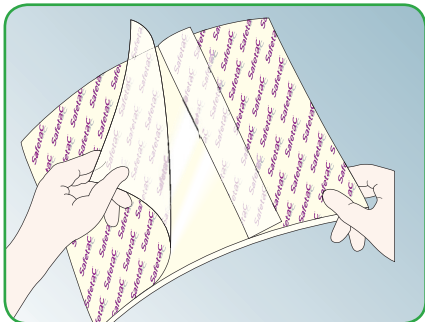

Rengör sårområdet.
Ta bort skyddsfilm.

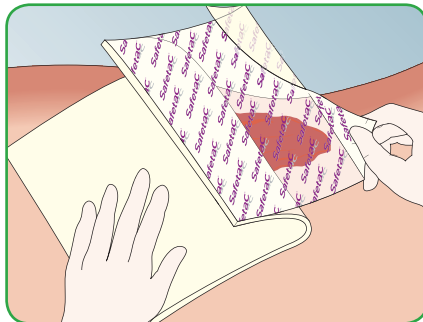

Applicera förbandet på såret. Ta bort den andra delen av skyddsfilm. Mepilex Transfer bör överlappa den omkringliggande huden med minst 5 cm.

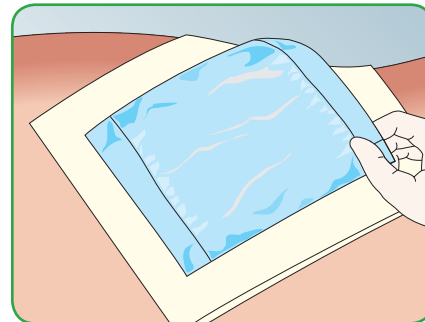

Applicera ett lämpligt absorberande förband och fixera.

Så här fungerar Mepilex Transfer

Mepilex Transfer är ett tunt och mycket bekvämt skumförband som högeffektivt transporterar sårsekret till ett absorberande ytterförband. Förbandet är smidigt, följsamt och kan enkelt klippas till för att passa till svårbandagerade områden. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Fördelar med Mepilex Transfer

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om
- Lämpligt för stora, ömtåliga och svårbandagerade områden
- Kan sitta kvar i flera dagar även vid byte av ytterförband, beroende på sårets tillstånd
- Kan ligga kvar på huden vid strålbehandling
- Frigör båda händerna vilket underlättar applicering av ytterförband
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Tunt, följsamt och formbart
- Fungerar bra under kompression
- Låg risk för hudirritation och allergi

Användningsområden

Mepilex Transfer är utformat för vätskande och svårbandagerande sår som t.ex. maligna tumörsår. Epidermolysis Bullosa (EB), tagställen, venösa bensår och fasciotomi. Mepilex Transfer kan också användas som ett skyddslager på sår som inte vätskar och/ eller på känsliga hudområden.

Notera

Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen med Mepilex Transfer om lämplig infektionsbehandling inleds.

Mepilex Transfer sortiment

(levereras sterila, enstycksförpackade)

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
294600	7,5 x 8,5	5	70
294700	10 x 12	5	50
294800	15 x 20	5	40
294502	20 x 50	4	24



Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Telefon 031-722 30 00
www.molnlycke.se
www.molnlycke.se/patient

The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac® and Mepilex® Transfer are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

