



Mestopore®

Absorberande förband för kontinent stomi

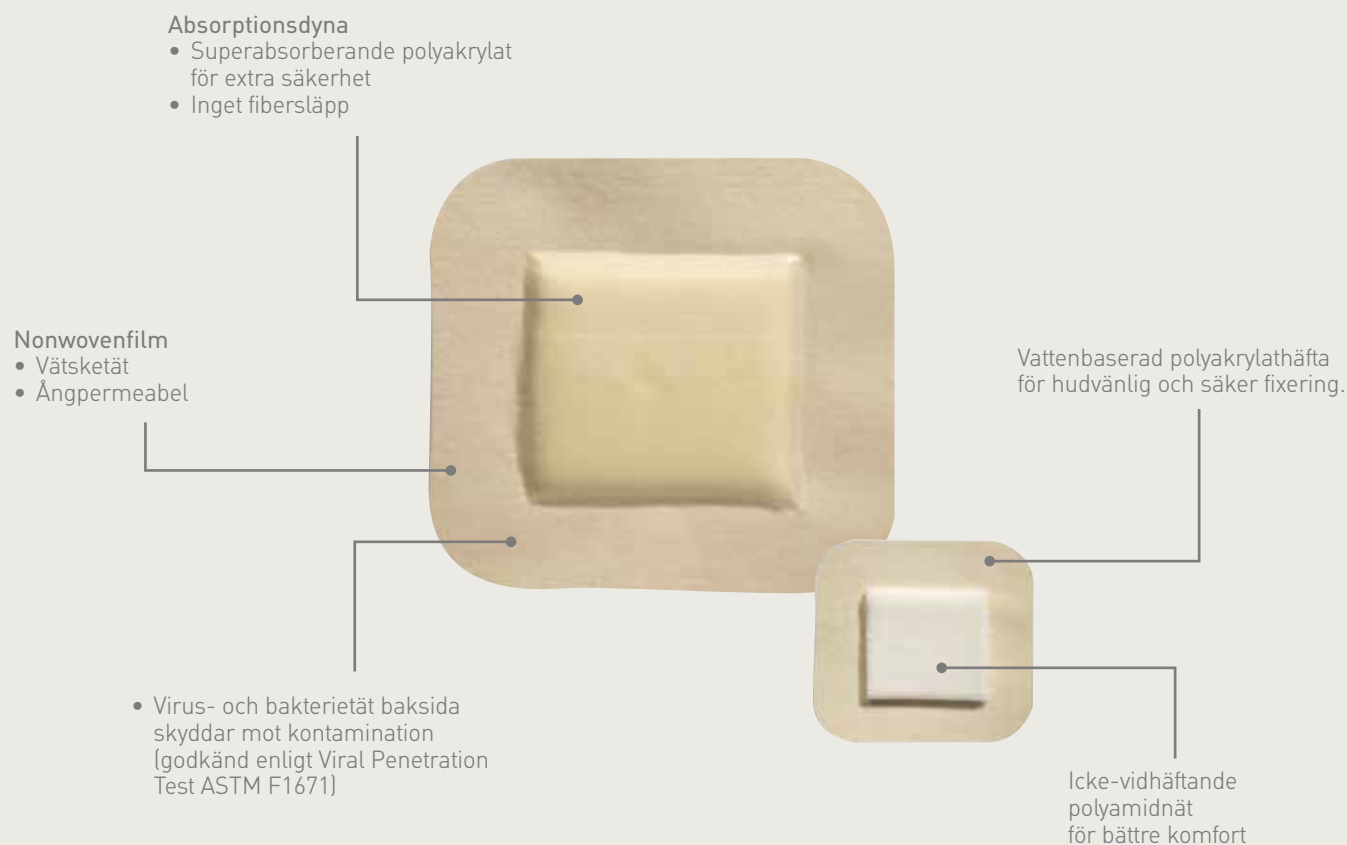


Mestopore är ett självhäftande absorberande förband för kontinent stomi.


Så här används Mestopore®

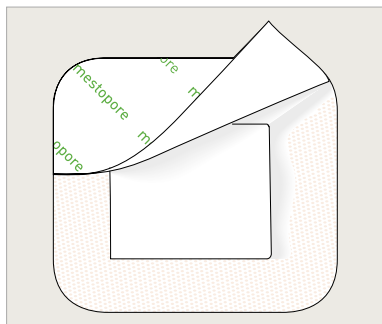

Ta bort skyddspappret från övre halvan av Mestopore.

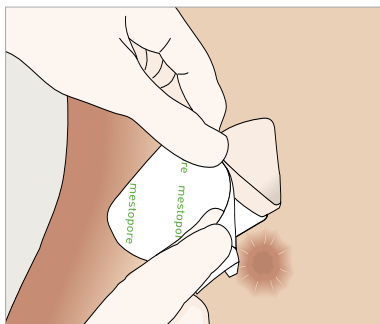

Applicera förbandet försiktigt mot huden över stomin. Ta bort det nedre skyddspappret och sätt fast resten av förbandet.

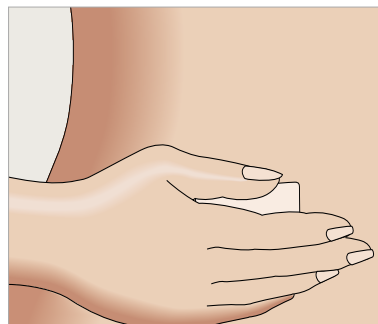

För att ta bort förbandet – lyft försiktigt från sida till sida.

Så här fungerar Mestopore

Mestopore är ett självhäftande förband för kontinent stomi. En icke-vidhäftande kontaktyta skyddar stomin från skada. Avsöndringen från stomin absorberas av högabsorberande svällande fibrer. Den självhäftande kanten förhindrar läckage och är hudvänlig även vid upprepade förbandsbyten. Nonwovenfilmen på ovsidan har en diskret beige färg och låter huden andas.

Fördelar med Mestopore

- Hudvänlig häfta
- Följsam
- Duschbar
- Lämnar inga rester
- Enkel att använda

Användningsområden

Mestopore är speciellt utvecklad för att användas på patienter med kontinent stomi.

Observera

Vid kliniska tecken på hudirritation rådgör med sjukvårdspersonal för lämplig behandling.

Mestopore levereras sterila, enstycksförpackade

Art.nr.	Apotekets varunr.	Storlek	Storlek sårdyna	Avd fp	Transp fp
665000	256743	9 x 10 cm	5 x 5,5 cm	20	160



Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and xxxxxx are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.