

# Mepilex<sup>®</sup> Transfer

Det effektiva förbandet för transport av sårsekret


## Tunt lager av polyretanskum

- Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband
- Formar sig väl och är lämplig för sår som är svåra att lägga om
- Lämpligt för stora och vätskande sår



## Safetac<sup>®</sup> yta

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte<sup>1</sup>
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration

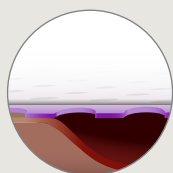

## Safetac<sup>®</sup> teknologi


Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.




\* mikrober större än 25 nm

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte<sup>1,2</sup>
- Transporterar sårvätska bort från såret och minskar risken för maceration<sup>3</sup>
- Smidigt, följsamt och formbart vilket underlättar omläggning av svårbandagerade områden


## Så här används Mepilex® Transfer

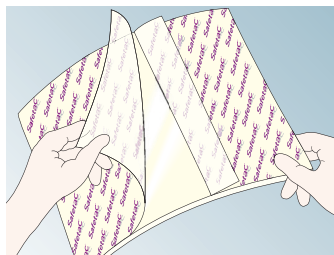

Rengör sårområdet.  
Ta bort skyddsfilmen.

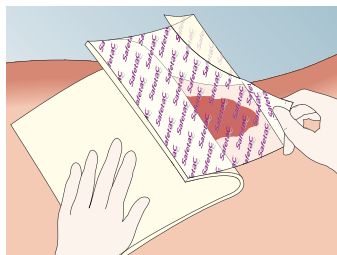

Applicera förbandet på såret. Ta bort den andra delen av skyddsfilmen. Mepilex Transfer bör överlappa den omkringliggande huden med minst 5 cm.

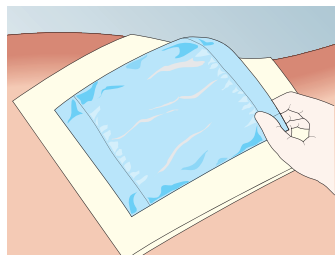

Applicera ett lämpligt absorberande förband och fixera.

## Så här fungerar Mepilex Transfer

Mepilex Transfer är ett tunt och mycket bekvämt skumförband som högeffektivt transporterar sårsekret till ett absorberande ytterförband. Förbandet är smidigt, följsamt och kan enkelt klippas till för att passa till svårbandagerade områden. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

## Fördelar med Mepilex Transfer

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om
- Lämpligt för stora, ömtåliga och svårbandagerade områden
- Kan sitta kvar i flera dagar även vid byte av ytterförband, beroende på sårets tillstånd
- Kan ligga kvar på huden vid strålbehandling
- Frigör båda händerna vilket underlättar applicering av ytterförband
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Tunt, följsamt och formbart
- Fungerar bra under kompression
- Låg risk för hudirritation och allergi

## Användningsområden

Mepilex Transfer är utformat för vätskande och svårbandagerande sår som t.ex. maligna tumörsår. Epidermolysis Bullosa (EB), tagställen, venösa bensår och fasciotomi. Mepilex Transfer kan också användas som ett skyddslager på sår som inte vätskar och/ eller på känsliga hudområden

## Notera

Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen med Mepilex Transfer om lämplig infektionsbehandling inleds.



Mepilex Transfer levereras sterila, enstycksförpackade

Art.nr.	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
294600	7,5 x 8,5	5	70
294700	10 x 12	5	50
294800	15 x 20	5	40
294502	20 x 50	4	24

Referenser: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007; 16(3):97-100.

Mer information på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00  
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepilex Transfer are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

  
**Mölnlycke®**