

BARRIER® Trousse d'extrémité - genou bilatérale, avec Drisite® Plus



- Drisite® Plus* assure une absorption et une gestion efficace des fluides
- Matériaux résistants et renforcés dans la zone critique, pour une qualité fiable et un haut degré de résistance à la déchirure
- Pliage optimal pour une application aseptique et une mise en place aisée par une seule personne
- Matériaux imperméables pour une sécurité optimale du patient

* Drisite® Plus est un système breveté pour la gestion des fluides se scinde en trois zones, composé d'une barrière sèche, résistante et absorbante.


Instructions sur l'utilisation du champ



1. Commencez par déplier le champ de table et posez-le sous les jambes du patient.



2. Placez le champ d'extrémité déplié devant les pieds du patient, le pictogramme tournée vers le corps du patient.

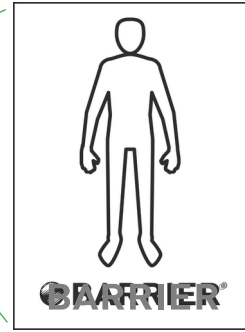

3. Passez la main dans l'ouverture élastiquée et agrippez les pieds du patient. Dépliez le champ vers le bas de la table d'opération puis vers le haut.



4. Dépliez la partie supérieure du champ par-dessus l'arc d'anesthésie.

N° de réf.	Description	Disp/Trp
60301	Trousse d'extrémité, genou bilatérale	7/14
	4 serviettes absorbantes 18x25cm	
	2 bandes adhésives 9x49cm	
	1 champ jambe bilatérale 200x300cm, ouvertures 7cm (élastique)	
	1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	

Tous ces composants des trousse peuvent également être inclus dans les trousse composites Mölnlycke®.

N° de réf.	Composants des trousse composites Mölnlycke®
70313	Champ jambe bilatérale 200x300cm, ouvertures 7cm (élastique)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke et BARRIER sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00851709)